





ジーシー MIローフローを 正しくお使いいただくために


1. フィリングチップは正しく装着し、フィリングチップ内の空気抜き作業を行ってからご使用ください。

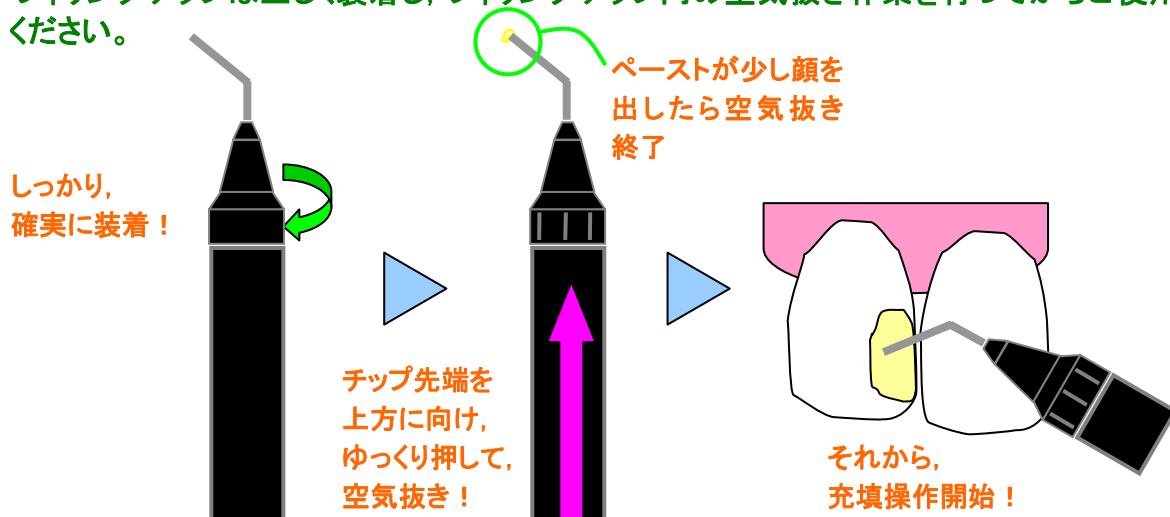

2. ご使用前にフィリングチップ先端部をアルコールワッテで清拭する場合、余分なアルコールを絞ってから行ってください。

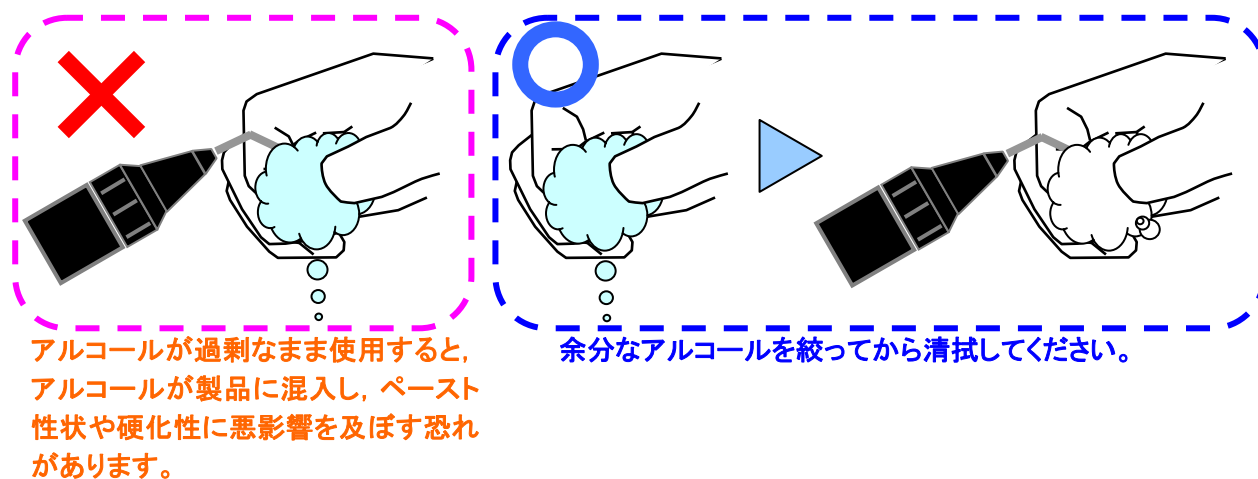


3. ペースト押し出し操作時は、プランジャー（押し棒）後端部を親指の付根に当てて行くと、押し出し量をコントロールしやすく、充填操作がスムーズに行えます。

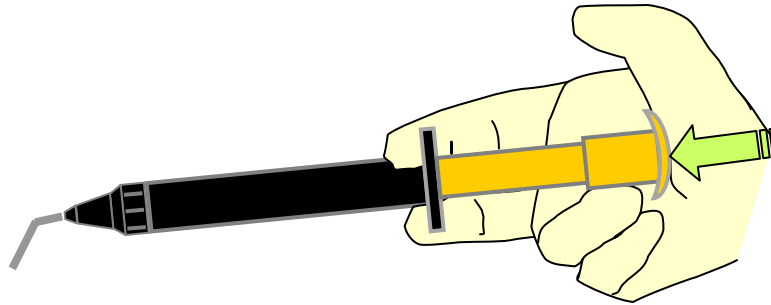

4. 充填物を窩洞マージン部に広げる等の操作を行う場合、フィリングインstrument No. 00等の先端の細いinstrumentで行うことをお勧めいたします。



フィリングチップ先端部周辺にペーストが付着すると糸引き現象が発生しやすくなります。

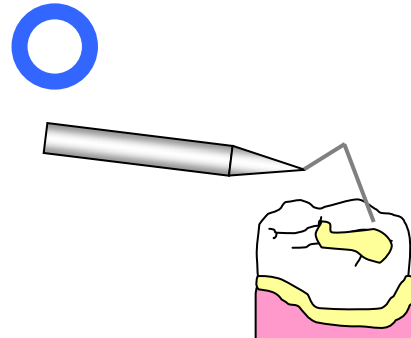

充填物を窩洞マージン部に広げる等の操作を行う場合、先端の細いinstrumentをご使用ください。

5. 充填物の形態修正は【カーバイドバー（F. G. 用） F1, F2L, F3, F5, F6】又は【スムーズカット レギュラー形態】、中間研磨は【スムーズカット ff形態】、【プレシャイン】、仕上げ研磨は【ダイヤモンド】の使用をお勧めいたします。スピーディに滑沢な研磨面を得ることができます。

