

# エッセンシア

光重合型審美修復用コンポジットレジン

GC



Since 1921  
100 years of Quality in Dental

Aesthetics brought  
back to the essentials



Open the door to  
simplification

Essentia®

保険適用外

# 6つの基本築盛パターン

## 前歯部

### 患者さんのエイジングに合わせたレイヤリング

ブリーチシェードや小児の歯は、エナメル質が白く不透明であり、象牙質もまた白い傾向にあります。このような症例ではライトデンチンとライトエナメルを組み合わせます。

ライトデンチン **LD**  
ライトエナメル **LE**



若年者の歯は、不透明で白いエナメルとより色の濃いデンチンの組み合わせが自然な印象を与えます。この症例ではミディアムデンチンとライトエナメルを組み合わせます。

ミディアムデンチン **MD**  
ライトエナメル **LE**



成人の歯は、エナメル質は透明性と色味が増す一方、象牙質の色はあまり変わりません。この症例ではミディアムデンチンとダークエナメルの組み合わせが最適です。

ミディアムデンチン **MD**  
ダークエナメル **DE**



高齢者の歯は、エナメルの部分には透光性と彩度が必要であり、また象牙質は、より色が濃く透明性が増します。この症例ではダークデンチンとダークエナメルの組み合わせが最適です。

ダークデンチン **DD**  
ダークエナメル **DE**



## 臼歯部

### 自然な2層レイヤリング、あるいは単層築盛

#### 2層レイヤリング

一般的に臼歯の象牙質は、暗く見え、エナメル質は、比較的白く見える傾向があります。この症例ではダークデンチンにライトエナメルを積層します。

ダークデンチン **DD**  
ライトエナメル **LE**



#### 単層築盛

多くの臼歯の症例ではユニバーサルシェードだけでも、審美的な修復が可能です。この症例ではユニバーサルの単層築盛です。

ユニバーサル **U**



※各写真のシェードガイドは、カスタムシェードガイドにより製作したものです。

# 7シェード2層レイヤリングで審美修復

エッセンシアそれはコンポジットレイヤリングの“パラダイムシフト”

エッセンシアに複雑な築盛テクニックは不要です。ヨーロッパのエステティック

デンティストグループが監修した、大胆かつ革新的なシェードコンセプトにより誕生しました。



写真提供：  
Marleen Peumans教授  
(ルーベン大学、ベルギー)

従来のシェードシステムは、色相を基本としたA系、B系、C系、D系で構成されています。しかし、実際の歯の色は異なる光学特性を持つエナメル質と象牙質から構成されており、単純な色相だけではなかなか表現しきれません。エッセンシアは、エナメル質と象牙質の光学特性を、エナメルシェードとデンチンシェードに持たせることで、シンプルな2層レイヤリングで天然歯に近い色調を再現します。

## シェードの特徴

象牙質の彩度と透明度は、各世代により異なります。エッセンシアの3つのデンチンシェードは、各世代に合わせた彩度と透明度を持たせており、色相において重要な役割を果たします。

また2つのエナメルシェードには適切な透明性を持たせており、デンチンシェードと組み合わせることにより、修復物に生命感をもたらします。

ライト  
デンチン



ミディアム  
デンチン



ダーク  
デンチン



ライト  
エナメル



ダーク  
エナメル



ユニバーサル



マスキング  
ライナー



# シェードに合わせた光学特性と操作性

## デンチン

彩度と透明度に違いを持たせ、あらゆる症例に色調がマッチ

デンチンシェードは、適切に光を反射、散乱させるフィラー設計で周囲に馴染みます。

ブラシでもスパチュラでも付形が容易にできるペースト性状です。



LD ライトデンチン

MD ミディアムデンチン

DD ダークデンチン

## エナメル

適度な透明性と耐摩耗性

エナメルシェードは、より透過性が高く修復物に生命感をもたらします。

ナノフィラーを高密度均一分散することで優れた研磨性と耐摩耗性を実現します。

LE ライトエナメル

DE ダークエナメル

## ユニバーサル

臼歯部の小さな修復のための単層シェード

ユニバーサルシェードは、小さな窩洞や臼歯部の修復など、レイヤリングの必要がない症例において、周囲にうまく調和するよう設計されています。

ペースト性状は、臼歯部での充填操作に合わせた圧接しやすいペースト性状です。

U ユニバーサル

## マスキングライナー

変色や着色を遮蔽

窩洞の最深部にも到達できるように、直接充填可能なフロアブルを採用しています。



ML マスキングライナー




## 2つのシェードで、自然な修復を可能にします!



写真提供：Javier Tapia Guadix先生（スペイン）、Marleen Peumans教授（ルーベン大学、ベルギー）

これまで複雑な築盛を必要とした前歯部症例でも**2つのシェード**（この症例ではミディアムデンチンとライトエナメル）による築盛で、隣在歯と調和し、**自然な外観**が得られます。

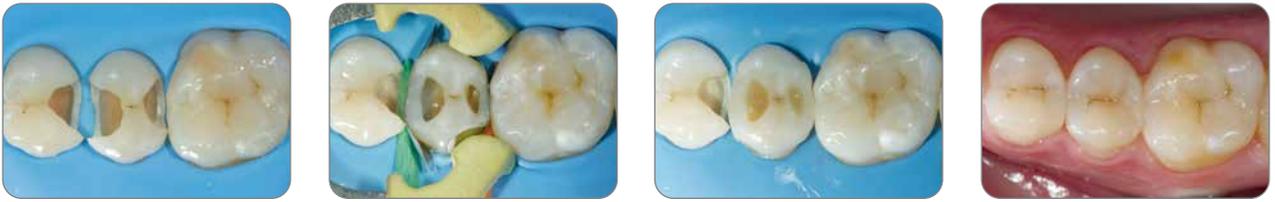

写真提供：Javier Tapia Guadix先生（スペイン）

臼歯部の症例は、**ダークデンチン**と**ライトエナメル**の組み合わせにより、**自然な色調**が得られます。



## キャラクターズ用のモディファイヤーを使えば、ワンランク上の審美修復が行えます



オパールセッセンスモディファイヤーで切縁にハロー効果を付与。



レッドブラウンモディファイヤーで臼歯の裂溝をキャラクターズ。



光重合型審美修復用コンポジットレジン

## エッセンシア

色調●7色=LD(ライトデンチン)、MD(ミディアムデンチン)、DD(ダークデンチン)、LE(ライトエナメル)、DE(ダークエナメル)、U(ユニバーサル)、ML(マスキングライナー)

### スターターキット

包装●セット1函:シリンジ2.0mL 7本(LD 3.4g、MD 3.4g、DD 3.4g、LE 3.8g、DE 3.8g、U 4.0g、ML 3.4g)、フィリングチップ用キャップ1個、フィリングチップⅢプラスチック2個、フィリングチップⅢ ニードル1個、カスタムシェードガイドシリコンモールド1個カスタムシェードガイドメタルタブホルダー1個、テクニックガイド(シェードコンセプト、シェードガイド、シェードセクション)

### 単品包装

#### 包装

●シリンジ2.0mL 1本(LD 3.4g、MD 3.4g、DD 3.4g、LE 3.8g、DE 3.8g、U 4.0g、ML 3.4g)各1函  
●ML(マスキングライナー)1函:シリンジ2.0mL 1本(ML 3.4g)、フィリングチップ用キャップ1個、フィリングチップⅢプラスチック2個、フィリングチップⅢ ニードル1個

歯科充填用コンポジットレジン ジーシー エッセンシア  
管理医療機器 228AABZX00099000



スターターキット



### エッセンシア シェード構成



光重合型ダイレクトボンディング用内部ステイン

## エッセンシア モディファイヤー

色調●4色=RBM(レッドブラウンモディファイヤー)、BM(ブラックモディファイヤー)、WM(ホワイトモディファイヤー)、OM(オーバーレッセンスモディファイヤー)

### モディファイヤーキット

包装●セット1函:RBM(2.4mL)1本、BM(2.4mL)1本、WM(2.4mL)1本、OM(2.0mL)1本


### 単品包装

包装●1函(各色):RBM(2.4mL)1本、BM(2.4mL)1本、WM(2.4mL)1本、OM(2.0mL)1本

歯科充填用色調調整材 ジーシー エッセンシア モディファイヤー  
管理医療機器 228AABZX00100000



### エッセンシア モディファイヤー シェード構成

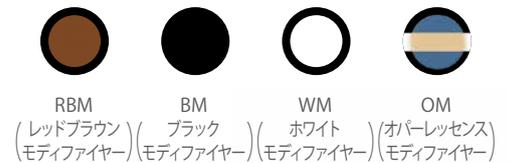

### 関連製品



多目的光重合型1液性ボンディング材

## G-プレミオ ボンド

セット 包装●セット1函:G-プレミオ ボンド(5mL)1本、ディスポーザブルアプリケーター(ファイン)50本、ディスポディッシュ 20枚  
2本包装 包装●2本包装1函:G-プレミオ ボンド(5mL)2本  
単品包装 包装●1本

歯科用象牙質接着材 / 歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材  
ジーシー G-プレミオ ボンド 管理医療機器 226AABZX00098000


※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ / 製造販売元 株式会社 ジーシー  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松2丁目285番地 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも

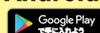

ジーシー  
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

