

ジーシー エクザクリア

咬合採得 / 多用途透明シリコーン印象材



限りなく、クリア

咬合採得 / 多用途透明シリコーン印象材

ジーシー エクザクリア

包装●

2カートリッジ1函=カートリッジ51g(48mL)2本、
ミキシングチップⅡL、S各3個

歯科咬合採得用材料 ジーシー エクザクリア
一般医療機器 13B1X00155000286



全光線透過率

97.3% ※ 追及したのは、限りなく高いクリアさ

物性値

操作余裕時間 (23℃)	約 45 秒
咬合採得時の 口腔内保持時間	2分
印象採得時の 硬化時間 (23℃)	約 7分

高い透明度と良好な操作性



「エクザ」シリーズで培ったジーシーの技術力で、全光線透過率 97.3%※、ヘイズ値 0.2%※の高い透明度と、バランスの取れた操作性を確保しました。

※試験条件：厚さ 4mm
ジーシー研究所測定データ

咬合をクリアに



非常に高い透明度を有しているため、容易に咬合状態を確認でき、顎位誘導しながらの咬合採得が行えます。

例えば、高強度硬質レジブリッジ作製に ~ジーシー エクスぺリアの使用ケース~



1 作業用模型にエクザクリアを吐出し、シリコンコアを作製します。適度な流動性を有し、垂れることなく作業用模型に密着します。



押し出しから約7分で硬化



2,3 作製したシリコンコアを用いてエクスペリアファイバーネットを支台歯に密着させます。



4 シリコンコアを通して光照射し、ファイバーネットを重合します。

例えば、間接法によるプロビジョナルレストレーション作製に ~ジーシー テンプスマートの使用ケース~



1,2,3 ワックスアップした作業用模型にポリエチレンフィルム等を用いてエクザクリアを圧接し、シリコンコアを作製します。



歯肉部までしっかりと覆います。

押し出しから約7分で硬化



4 シリコンコアを取り外し、不要部分をトリミングします。適度な弾性を有するため、アンダーカットがある症例でも簡単に取り外すことができます。



5,6 シリコンコアにテンプスマートを注入し、ワックスパターンを取り除きワセリン等の分離材を塗布した作業用模型に圧接します。



7,8 化学重合による硬化に加え、シリコンコアの高い透明度を活かして光重合することにより、迅速に作業が行えます。光重合のみで硬化するレジンにも使用できます。

※口腔内での光重合は行わないこと(火傷の恐れがあるため)

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年4月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ゴーシー** / 製造販売元 **株式会社 ゴーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。