

ジーシー ルーティング

接着性ルーティングセメント

バーサ
VERsa



Since 1921
100 years of Quality in Dental

合着時の診療スタイルに着目！ バーサ
時間的な安心感をもたせた「ルーティング VERsa」

約90秒間

余剰セメントの除去可能時間

口腔内保持時間

5分
以上



※ VERsa(バーサ)はVERSATILE(融通が利く)という発想から生まれた商品名です。



接着性ルーティングセメント

バーサ
ジーシー ルーティング VERsa

色調●1色=ホワイト

包装●1函：カートリッジ12.0g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊

歯科接着用レジンセメント ジーシー ルーティング バーサ 管理医療機器 225AKBZX00150000

※ 歯面処理材(ジーシー フジルーティング コンディショナー)は使用できません。



関連製品

CD ディスペンサーⅢ



包装●1函：1個

エコSTOPパー



包装●1函：1個

CDプランジャー



包装●1函：1個

歯科用充填・修復材補助器具
ジーシー フジルーティングCD
プランジャー 一般医療機器
13B1X00155000227

プラスチックヘラ No.4



色調●1色=ピンク

包装●1本



プラスチックヘラ(No.4)は、インレー、クラウン、コアなどへ適量のペーストを塗布しやすい先端形状です。

プラスチックヘラ No.1



色調●(No.1)2色=青、白

包装●1本(各色)

歯科用充填・修復材補助器具 ジーシー CDディスペンサーⅢ
一般医療機器 09B2X00010G00063
製造販売元 株式会社シオダ

“合着臨床”の効率化をご提案

合着時の診療スタイルに着目し合着臨床の効率化をご提案します！


リン酸エステル系モノマー「MDP※」をセメント基材に配合し、プライマーを使用せず、歯質、金属へ強固に接着する接着性ルーティングセメントです。ゆっくり硬化する特性により余剰セメント除去の操作時間が長く、ゆとりをもって除去作業が行えます。（※ 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate）



※ 23℃で練和開始からセッティングまでの操作時間は約4分です。


容易な練和操作と高い視認性

各ペーストは練和しやすいクリーミーなペースト性状。2色に色分けすることで、練和状態を視覚的に確認できます。また、歯質と余剰セメントの判別がしやすい色調設定にしています。

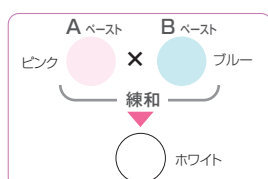

CDディスペンサーⅢの使用法ポイント

CDディスペンサーⅢは、カートリッジを装着することにより、必要な量を最適な比率で採取することを可能にしたツールです。

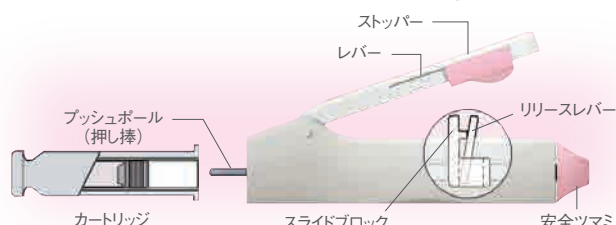

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2022年7月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

エコSTOPPERを使用 1クリック(インレー)、2クリック(クラウン)


エコSTOPPER(別売)を用いることで、1クリックでインレー、2クリックでクラウンの適量(目安)が採取可能。誰でも簡便・正確な計量操作で、より経済的に使用できます。

エコSTOPPER使用の有無による1クリック採取量の比較
体積比(Aペースト:Bペースト=1:1) ※ペースト画像はほぼ原寸大



高い接着力と曲げ強度

「ルーティンVErsa(バーサ)」は、歯質接着性、曲げ強さなどにおいて、高い理工学的特性を発揮します。

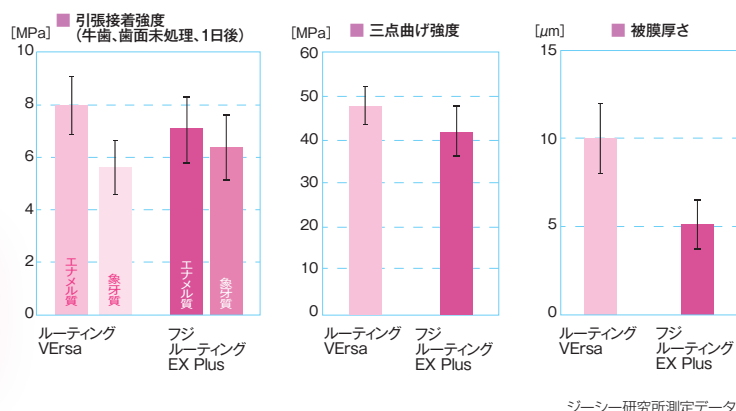

ジーシー研究所測定データ

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。

ジーシー
公式アプリ

