


手術顕微鏡 EXTARO 300

マイクロスコープ



Since 1921
100 years of Quality in Dental

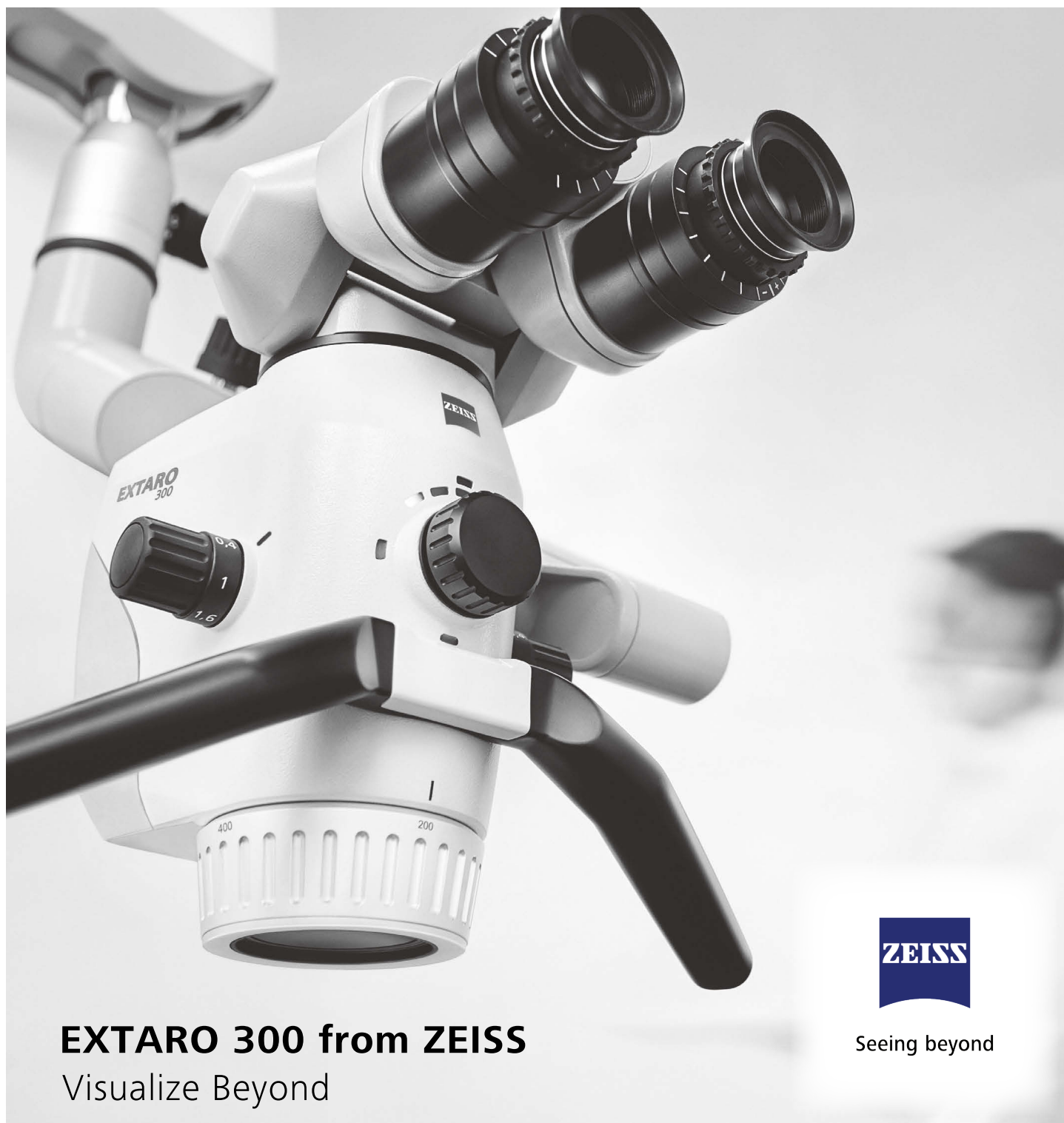

EXTARO 300 from ZEISS

Visualize Beyond



Seeing beyond

PERFECTING YOUR ART.

ZEISS EXTARO 300

あらゆる歯科診療にとって進化した手術顕微鏡 EXTARO 300

歯科用手術顕微鏡は、歯内療法をはじめとした診療に優位な視覚をもたらしています。
EXTARO 300 は歯科の診療を研究し、歯科のために開発されました。

Experience Ergonomics

操作を全て顕微鏡の中心部に集約しました。
光量調節、対物レンズ操作時もハンドルから手を放すことなく、
片手のみの操作を行うことができ、診療の妨げになりません。



光量調節および各種モード切替が可能な
マルチファンクションノブ



パリオスコープ 230
(焦点距離を 200mm~430mm まで変更可能な対物レンズ)



MORA interface(オプション)

OPMI picoシリーズに搭載し、歯科用手術顕微鏡のゴールドスタンダードともいえるMORAインターフェースはEXTARO 300にも搭載可能です。
MORAインターフェースは顕微鏡鏡基部を左右に振っても、術者が覗いている鏡筒部分は常にまっすぐに保つことができます。
これにより背筋をのばした姿勢を維持することができ、長時間にわたる治療でも術者への負担が低減されます。



MORAインターフェース



ストレートカップリングはMORAインターフェース仕様のみ搭
載が可能です。



120°カップリングも選択可能です。

The power of Digital Interaction(オプション)

EXTARO 300にはオプションで顕微鏡基内にHDカメラを内蔵し、鮮明な画像を容易に記録
することができます。また、専用のアプリケーションをインストールしたiPadに表示される画像
を用いて、患者の状態や治療の様子を説明することが可能です。





See in True Light

NoGlare mode(オプション)


EXTARO 300は偏光照明を用いて拡大視野下での観察を初めて実現した手術顕微鏡です。この照明により歯の色調を正確に確認することができ、また歯表面からの反射を低減します。

True Light mode(オプション)


True Lightモードは顕微鏡下でのコンポジットレジン of the early overlap is suppressed. In addition to the traditional orange color mode, it is possible to perform precise composite modeling by spending time. Moreover, the color balance is optimized, making it easy to identify the tooth tissue.



拡大視野

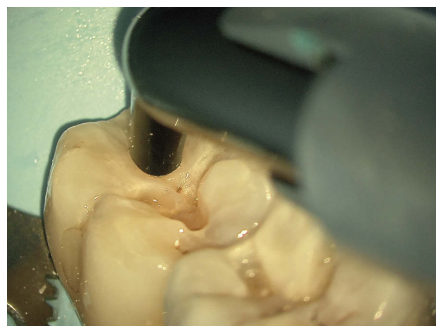

True Lightモード下のコンポジットレジン充填

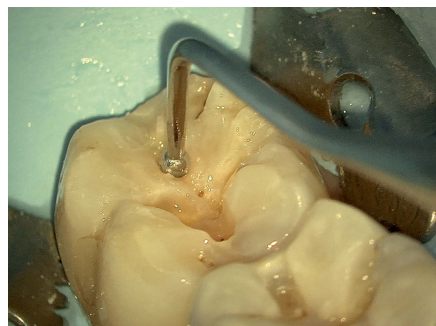


True Lightモード下でのコンポジットモデリング

Image courtesy of : Oscar Freiherr von Stetten, Stuttgart, Germany


See to Preserve

Fluorescence mode(オプション)


世界で初めて蛍光モードを内蔵した歯科用手術顕微鏡 EXTARO 300はこれまで以上に有効な診断、効率的なワークフローをサポートします。手術顕微鏡で拡大した視野下にて歯石・歯垢が付着している箇所は赤色、正常な部位は緑色となるため、カリエスリスクの高い箇所の識別を補助し、処置前後のインフォームドコンセントや治療を効率的に行うことができます。

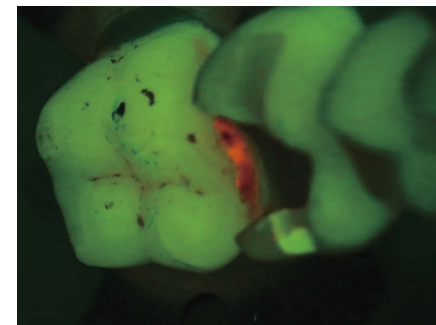

蛍光モードでの観察

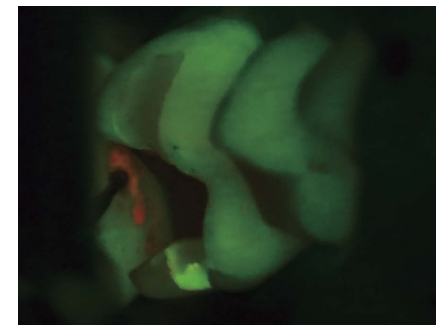

蛍光モードでの処置

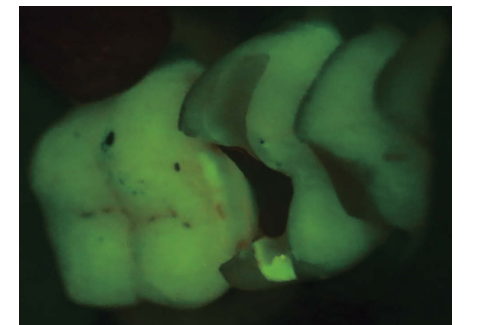

処置後

Image courtesy of : Dr.Tomas Lang Essen,Germany

See to Difference

Fluorescence mode(オプション)


EXTARO 300に搭載されたFluorescence(蛍光)モードでは天然歯とコンポジットレジンの境界を識別することも容易になります。ターゲットとする箇所をすばやく認識でき、貴重なチェアタイムを有効に使うことができます。



蛍光モードでの観察



蛍光モードでの処置

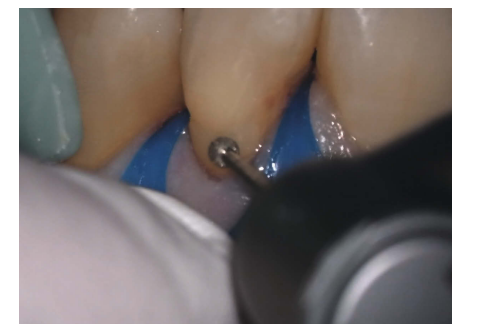

通常照明下

Image courtesy of : Dr.Tom Schloss Nuremberg,Germany

Technical Data



手術顕微鏡 EXTARO 300
(フロアスタンド)



手術顕微鏡 EXTARO 300
(マウントタイプ)

Basic configuration (標準仕様)

変倍システム	手動アポクロマート変倍
接眼レンズ	標準12.5×
鏡筒	180度可変鏡筒
Focus	パリオスコープ230 ワーキングディスタンス: 200~430mm
照明システム	LED照明 オレンジカラーモード・グリーンカラーモード
照明機構	ファイバーライトガイド同軸照明
特長	人間工学に基づいたハンドグリップ 片手で操作可能な光量・各種モード・ フォーカス・ワーキングディスタンス調整
その他	ドレープ取付け用リング ドレープ


オプション

歯科専用モード	True Lightモード NoGlareモード Fluorescenceモード ^{*1}
人間工学的パーツ	フォルダブルチューブ MORAインターフェース 内蔵HDカメラ・録画機能 ^{*2}
照明	LightBoost-Xenonと同等の光量


^{*1} Fluorescence モードは、初期導入時に内蔵 HD カメラ付仕様の選択が必要です。

^{*2} USB メモリーの容量は 32GB (FAT32 フォーマット) までの対応となります。


	フロアスタンド	マウントタイプ (天井懸架装置)	マウントタイプ (床固定)
重量	125kg (すべてのアクセサリを含む)	66kg	64kg
定格電圧	交流 100V 50-60Hz		
最大消費電力	120VA		
EMC 適合規格	IEC60601-1-2		
電撃に対する保護の形式	クラスⅠ機器		
電撃に対する保護の程度	B 形装着部をもつ機器		
液体の有害な侵入に対する保護の程度	IPX0		

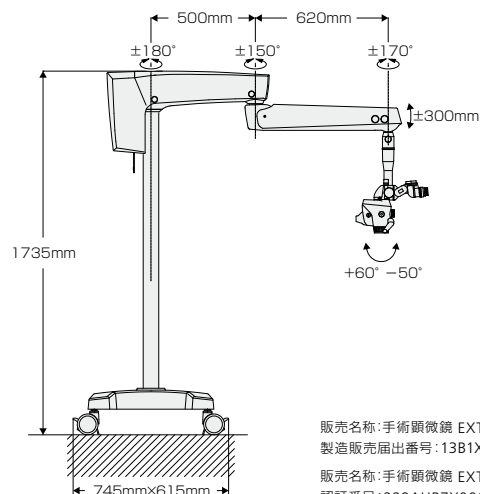

販売名称: 手術顕微鏡 EXTARO 300
製造販売届出番号: 13B1X00119003570
販売名称: 手術顕微鏡 EXTARO 300 FV
認証番号: 229AHBZX00034000

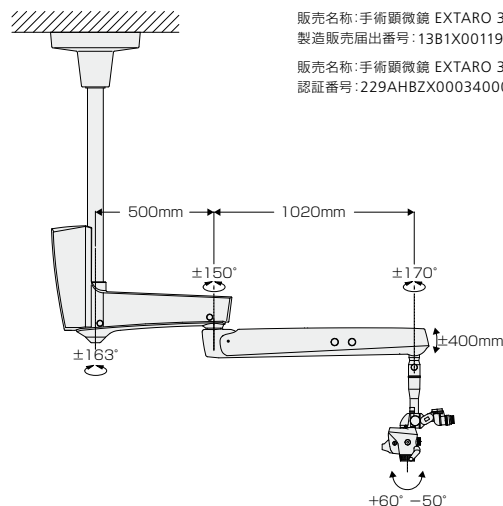

販売名称: 手術顕微鏡 EXTARO 300 マウントタイプ
製造販売届出番号: 13B1X00119003590
販売名称: 手術顕微鏡 EXTARO 300 FV
認証番号: 229AHBZX00034000

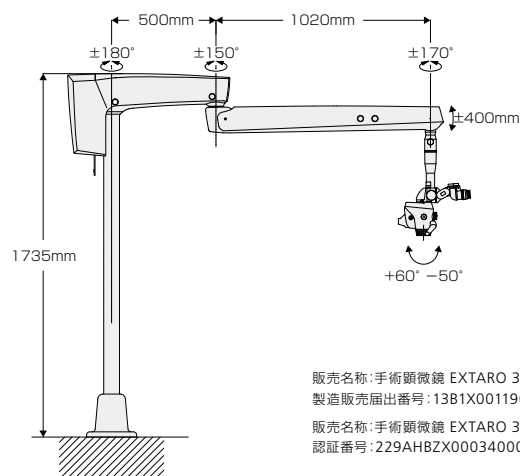

販売名称: 手術顕微鏡 EXTARO 300 マウントタイプ
製造販売届出番号: 13B1X00119003590
販売名称: 手術顕微鏡 EXTARO 300 FV
認証番号: 229AHBZX00034000

※掲載の情報は2023年2月現在のものです。

※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがございますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

※写真には一部オプションを含む場合があります。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **カールツァイスメディテック株式会社**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都千代田区麹町二丁目10番9号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東 北 (022) 207-3370 ●九 州 (092) 441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

ジーシー
公式アプリ

