

歯の周りのすき間には かくれプラークが!!

取り残したプラークは
むし歯・歯周病の
原因に

歯と歯のすき間

インプラントや
ブリッジなどの周り

歯と歯肉のすき間

お部屋の隅やすき間をお掃除するとき
掃除機の先端を付け替えませんか?

お口の中も同じです

全体は
歯ブラシ

すき間は
補助用具

ルシェロ 歯間ブラシ (ハンドル付)

包装●ハンドル1本、替えブラシ4個
キャップ1個、着脱ケース1個
希望患者価格● 1袋=¥530 (税込)

ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ (4個入)

包装●替えブラシ4個
キャップ1個、着脱ケース1個
希望患者価格● 1袋=¥280 (税込)

ルシェロ ペリオブラシ (ハンドル付)
NO.1T/NO.2T

包装●ハンドル1本、替えブラシ2個
キャップ1個、着脱ケース1個
希望患者価格● 1袋=¥650 (税込)

ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ (4個入)
NO.1T/NO.2T

包装●替えブラシ4個
キャップ1個、着脱ケース1個
希望患者価格● 1袋=¥830 (税込)

鏡を見ながら磨いてみましょう!

種類	径
4S	φ0.6mm~
SSS	φ0.7mm~
SS	φ0.8mm~
S	φ1.2mm~
M	φ1.5mm~
L	φ2.0mm~
LL	φ2.4mm~
ペリオタイプ	
NO.1T 細め	
NO.2T 太め	

歯間の状態を歯科衛生士さんにチェックしてもらい、最適なサイズを選んでみましょう。

※掲載内容・希望患者価格は2023年3月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。
※無断転載、無断複製を禁じます。

発売元

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

Since 1921
100 years of Quality in Dental

なぜ歯間ブラシや
ペリオブラシが
必要なの?

歯の周りの すき間のお話。

歯と歯のすき間に
ルシェロ
歯間ブラシ

選べる
替ブラシの向き

アウター
アングル

インナー
アングル

※替ブラシはどちらの
ハンドルにもお使い
いただけます。

奥歯まで磨きやすい
ロングハンドル&ネック

(ほぼ原寸大)

歯の周りのすき間に
ルシェロ
ペリオブラシ

磨き方

※ご使用前に歯科医師・歯科衛生士より使い方の
指導を受けて正しくお使いください。

歯間ブラシ ▶ 頬側・舌側からそれぞれ
ブラシを入れる。

頬側

すき間の広い方

舌側

インナーアングルが
おすすめ！


ブラシ交換の目安

繰り返しの使用で毛先が傷んできた場合は、早めに
交換してください。
替ブラシの固定が緩んできたなら、新しい替えブラシ
に交換してください。交換しても固定が緩い場合に
は、ハンドルを交換してください。

ペリオブラシ ▶ 毛先がしなるくらいの力加減で、
やさしく歯の周りにあてます。
(適正圧：約20～25g)

細め NO.1T


太め NO.2T

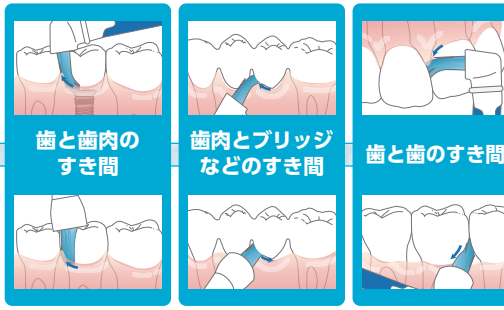

ブラシの動かし方



ブラシ交換の目安

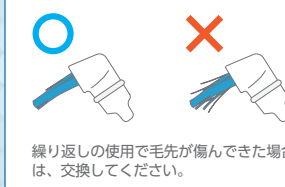


着脱ケース

替ブラシの交換


握り方

着脱をおこなう時は、グリップエンドを手の
ひらに固定してハンドルをしっかり握ります。

ヘッドの外し方

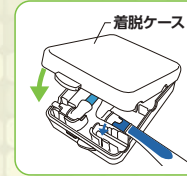


着脱ケースのふたを開け、
空いているスペースにセッ
トします。

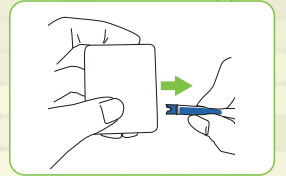


ハンドルを引き抜きます。

ヘッドの付け方

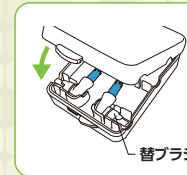

着脱ケースのふたを開け、
空いているスペースに替え
ブラシをセットして、ふた
を閉めます。

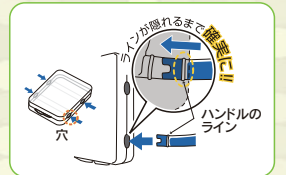

ハンドルの向きに注意して、ケ
ースをしっかり押さえながら「カチッ
」と鳴るまで（ハンドルの白いライ
ンが隠れるまで）確実に差し込ん
だあと、ふたを開け、ハンドルを
持ち上げます。

リスクの
高いところに
+αケア

ルシェロ
ポイントケアジェル

医薬部外品＜薬用ハミガキ＞



製造販売元 日本セトック株式会社
東京都千代田区九段南2丁目3番26号

フレーバー●ハーブミント
希望患者価格●1本=¥730(税込)