



歯科用オフィスホワイトニング

ティオン オフィス

包装●オフィスホワイトニング材 シリンジA(1.0g) 1本、オフィスホワイトニング材 シリンジB(1.0g) 1本、リアクター(2.0g) 1本、歯肉保護レジン(1.5g) 1本、ディスボーザブルディッシュ 1個、ディスボーザブルブラシ 2本、ディスボーザブルファイバー付きチップ 2個

単品包装

歯肉保護レジン

包装●1歯:1.5g1本

歯科用漂白材 ティオン オフィス
高度管理医療機器 22200BZX00785000

関連製品



リップジェル

包装●1歯:1個 8g



リトラクター

サイズ●2種:S、Mサイズ
包装●1歯:5個



フェイシャルシート

包装●1歯:100枚



ブリリカ ビアンコ

仕様●

電源入力	DC7.2V (リチウムイオンバッテリー)	質量	本体:約100g コントローラ:約230g お知らせ受信機:約90g
充電器定格	50/60Hz AC	連続使用時間	約80分(満充電時)
光源LED	φ3 LED×90個	タイマー設定時間	0.5~20分
寸法	本体:141mm(幅)×85mm(奥行)×43mm(高さ) コントローラ:68mm(幅)×128mm(奥行)×50mm(高さ) お知らせ受信機:61mm(幅)×103.5mm(奥行)×18.5mm(高さ)	発光波長域	400~480nm
充電時間	約150分	照射エリア	70mm(幅)×25mm(高さ)

包装●パッケージ: 本体1台、コントローラ1台、お知らせ受信機1台、ブリリカ用開口器S/SS各1個、保護めがね1個、収納袋1個、院内掲示用パネル、患者様用リーフレット50部、口唇・口腔シート化粧品リップリー1歯10枚入

歯面漂白用加熱装置 ブリリカ ビアンコ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 14B2X00036000008

発売元 株式会社東京技研 製造販売元 株式会社東京技研横浜工場
東京都世田谷区玉堤1-25-13 横浜市都筑区東山田4-42-37

歯科用開口器 口角鉤 ダブルワイダー 一般医療機器 11B1X1006500205

発売元 株式会社東京技研 製造販売元 株式会社YDM
東京都世田谷区玉堤1-25-13 埼玉県東松山市今泉28



歯科用ホームホワイトニング

ティオン ホーム プラチナ

包装●1歯:ホームホワイトニング材(2.5mL) 4本、トレーシート 2枚、トレーケース 1個、シェードガイド 1枚、ペーパーバック 1袋

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 ティオン ホーム プラチナ
高度管理医療機器 22900BZX00205000



2シリンジ

包装●
1袋:ホームホワイトニング材
(2.5mL)2本



リフィル(10本)

包装●1歯:
ホームホワイトニング材(2.5mL)
1本入×10



リフィル(20本)

包装●1歯:
ホームホワイトニング材(2.5mL)
1本入×20



薬用歯みがき

ルシェロ

歯みがきペースト ホワイト

内容量●100g
包装●1歯:1本

製造販売元 日本ゼット株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



歯ブラシ

ルシェロ歯ブラシ W-10

色調●2色=パールホワイト、パールゴールド
毛のかたさ●やわらかめ
包装●1歯:6本(各色3本)



ミネラル含有ペースト

MIペースト

内容量●40g

包装●

イントロダクトリーセット1歯:3本(ストロベリー/ヨーグルト/ミント)
アソートセット1歯:10本(各フレーバー2本)

各フレーバー1歯:1本

包装●1歯:1本



歯面清掃用カップ

ジーシー PTCカップII

包装●1歯:20個

歯磨カップ ジーシー PTCカップII

一般医療機器 13B1X00155000290



フッ素入り歯面研磨ペースト

ジーシー PTCペースト

ルシェロ ホワイト

内容量●80g

包装●1歯:1本

歯面研磨材 ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト

一般医療機器 13B2X00124000003

製造販売元 日本ゼット株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



ミネラル含有ペースト

MIペースト

内容量●40g

包装●

イントロダクトリーセット1歯:3本(ストロベリー/ヨーグルト/ミント)
アソートセット1歯:10本(各フレーバー2本)

各フレーバー1歯:1本

包装●1歯:1本

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも

App Store Google Play

ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。



JJ048M2307

ティオン オフィス／ホーム プラチナ

歯科用ホワイトニング

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental





医療ホワイトニングとは




歯科医師・
歯科衛生士※¹が
※¹ 歯科衛生士は歯科医師の指導のもと
医療ホワイトニング行為を実施



医療機器製品※²
を用いて
※² 過酸化水素／過酸化尿素／光照射器

歯の内部まで白くするホワイトニングです。

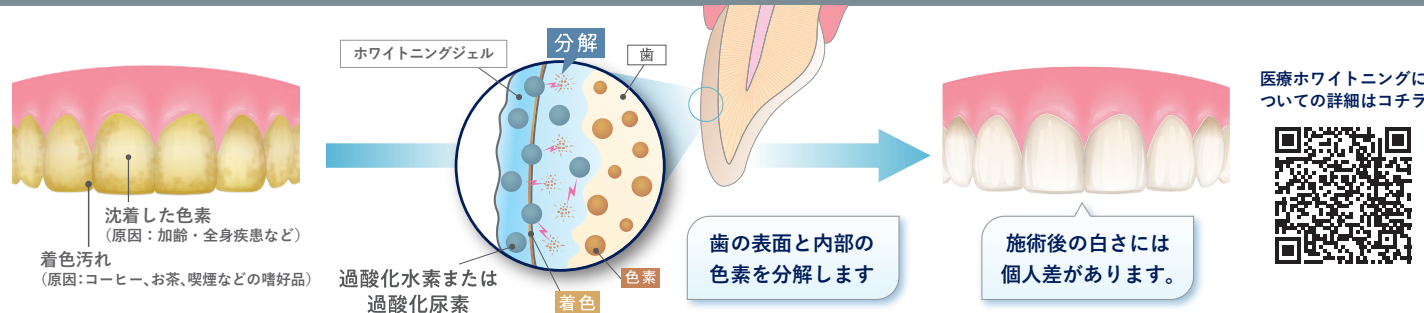

医療ホワイトニングについての詳細はコチラ




ティオン オフィス

低刺激で高いホワイトニング効果

過酸化水素濃度
約23%※

※混和後の歯面塗布時の濃度

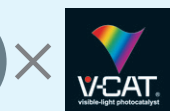

豊田中央研究所が開発した
可視光応答型光触媒。

V-CAT®のはたらき



光照射されると電子を放出し、過酸化水素と反応することで多くのヒドロキシラジカルが発生するため、着色物質を効率よく分解します。

臨床試験の結果

治験の概要 72名の着色歯を有する成人を対象に、本品を用いて漂白処置を行い、その安全性と有効性の評価を行った。治験の結果について、下記に示す。

- 安全性 漂白処置中、漂白処置直後及び漂白処置から1週間後に問診・口腔内検査を行うことにより、安全性を評価した。その結果、有害事象として歯肉の自覚が11症例、軽度の副作用(唇が乾燥してヒリヒリした)が1症例認められた。

- 有効性 漂白前後の歯の色を、明度順に並べたVITAPAN classical シェードガイドを用いてシェードテイキングを行い、その明度の差により有効性を評価した。その結果、全ての症例において歯の色調は改善され、漂白効果が認められなかった症例及び色調が暗くなった症例はなかった。
- 3シェード以上改善:57症例 ●1〜3シェード改善:15症例

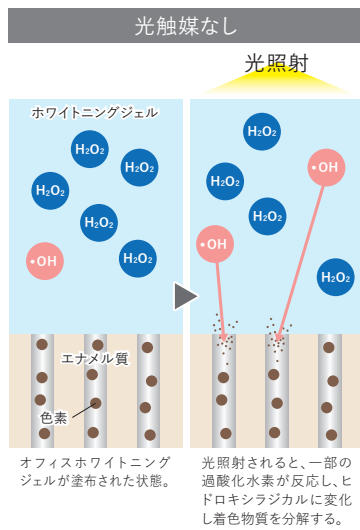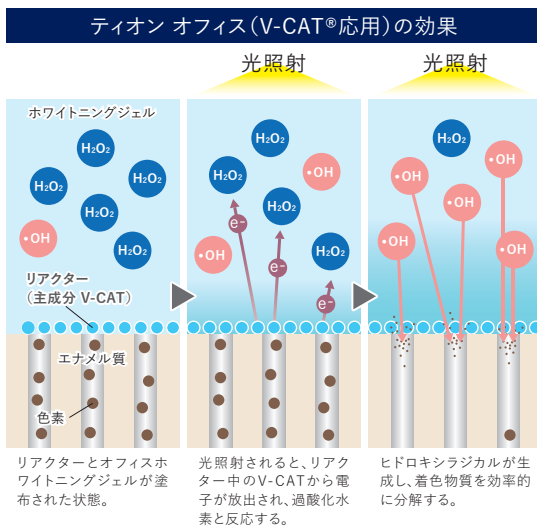


ティオン ホーム プラチナ

有効成分が効率よく歯面に浸透


ジェルが水となじみやすく、有効成分が歯面に浸透しやすいため、効率よくホワイトニング効果を発揮します。



※効果には個人差があります。

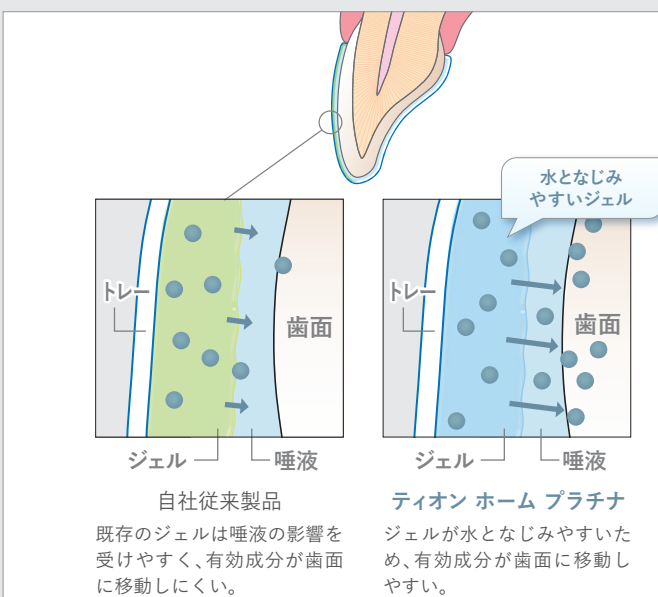

有効成分放出量比較試験

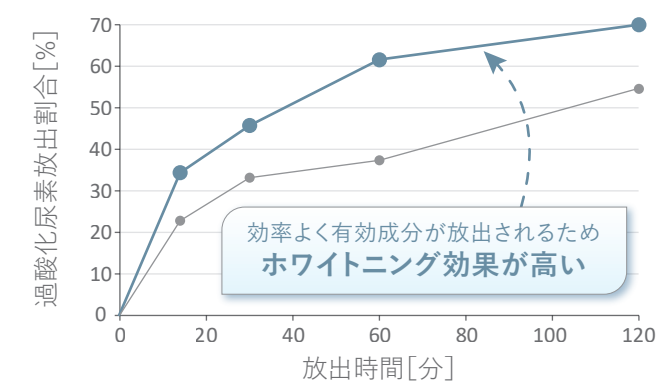


効率よく有効成分が放出されるため
ホワイトニング効果が高い

ジーシー研究所試験結果
合成ハイドロキシアパタイトブロック
への有効成分の放出量を測定

安全な光波長域で反応

一般的に、二酸化チタン光触媒は紫外線域の光にしかほとんど反応しませんが、V-CAT®(可視光応答型光触媒)は二酸化チタンの酸素の一部が窒素に置換されることで、可視光線域の光にも充分反応するため、歯科用照射器を用いたオフィスホワイトニングへの応用が可能となりました。

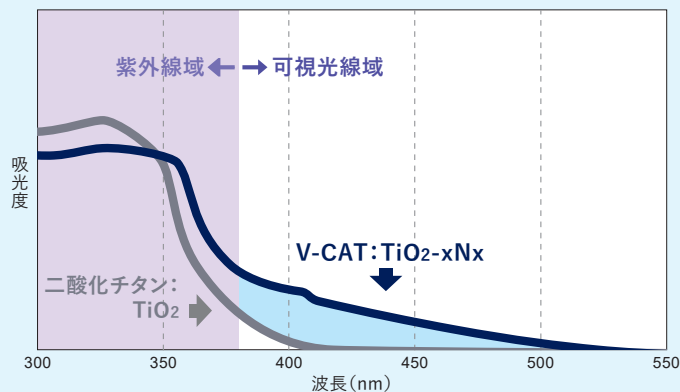


安全に使えるシステム

歯肉保護レジンにより、ホワイトニングジェルの歯肉への付着を防ぎます。また、ホワイトニングジェルはシリンジAとシリンジBを接合して混合し、ディスプレイファイバー付きチップから直接塗布できるため、安全にお使いいただけます。



溶けにくく、垂れにくい、よく伸びるジェル性状

ジェルが唾液に溶けにくいため、歯面に密着して広がって留まり、マウストレー装着時に歯面にムラなく有効成分が作用します。

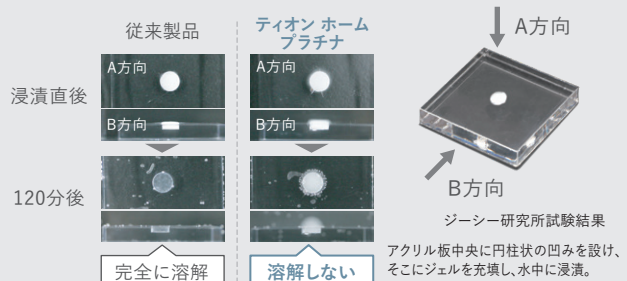

確認しやすい白色ジェル

ジェルが白色のため、マウストレー内のジェルの広がりを確認できます。ジェルがトレーからあふれ出た場合も、患者さんご自身が目視で確認できるため、すぐにジェルを拭き取ることが可能です。



しなやかなで
歯面にフィットする
マウストレー

